


GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR MEDIZINISCHE LAGERUNGSHILFEN EINMALPRODUKTE

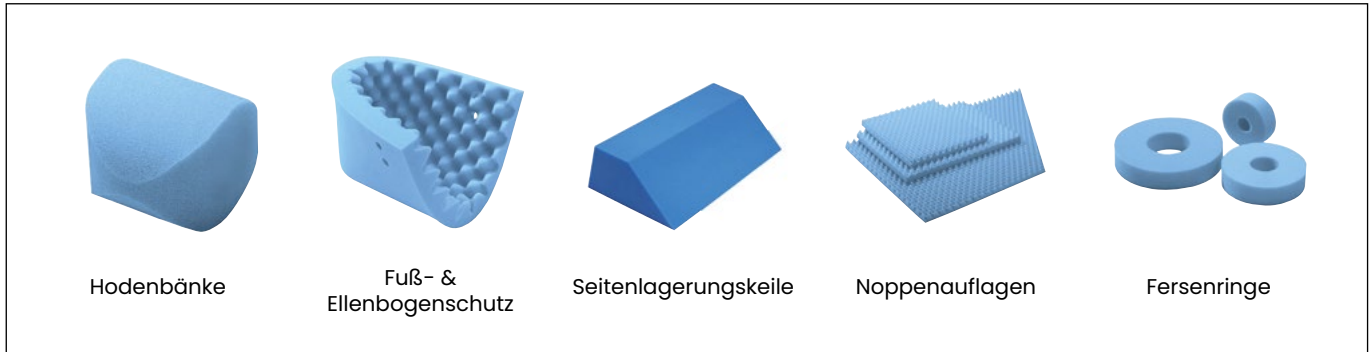

1. Grundlegende Hinweise

Das Produkt ist gemäß der beiliegenden Gebrauchsanweisung zu verwenden, die für eventuelle Rückfragen sorgfältig aufbewahrt werden sollte. Sie enthält wesentliche Informationen für den bestimmungsgemäßen Einsatz und trägt dazu bei, Schäden oder Gefährdungen durch Fehlanwendungen zu vermeiden.

Jedes schwerwiegende Vorkommnis, welches im Zusammenhang mit den Lagerungshilfen auftritt, ist sofort der Polyform Kunststofftechnik GmbH & Co. Betriebs KG, als auch der zuständigen Behörde zu melden.

2. Symbolerklärung

	Hersteller		Herstellungsdatum		Medizinprodukt		Konformitätskennzeichnung gemäß der europäischen Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)
	Achtung! Beachten Sie die in diesem Dokument aufgeführten Hinweise.		Gebrauchsanweisung beachten		Nicht waschbar		Nicht bügeln
	Nicht im Trockner trocknen		Kann nicht mit Bleichmittel behandelt werden		Nicht chemisch reinigen		Einwegprodukt - Produkt zum Einmalgebrauch
	Trocken aufbewahren		Vor Sonnenlicht schützen		Chargennummer		

3. Zweckbestimmung und Einsatzbereich

Die Lagerungshilfen sind für die einmalige Lagerung von Patienten Kopf, -rumpf oder der äußeren Extremitäten in medizinisch erwünschten Positionen gedacht. Die Lagerungshilfe darf nur von eingewiesenem Fachpersonal in Kliniken, Praxen oder sonstigen Gesundheitseinrichtungen angewendet werden.

4. Indikation

Die Lagerungshilfen sind vielseitig einsetzbar und unabhängig von spezifischen Krankheitsbildern, Anwendungsbereichen oder Diagnosen nutzbar. Sie dienen der Unterstützung, Stabilisierung und Druckentlastung bei der Positionierung von Menschen mit entsprechendem Bedarf. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten lassen sich die Indikationen nicht auf einzelne medizinische Bedingungen eingrenzen.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR MEDIZINISCHE LAGERUNGSHILFEN EINMALPRODUKTE

5. Kontraindikation

Kontraindikationen lassen sich nicht auf bestimmte Krankheitsbilder eingrenzen. Das Produkt sollte jedoch nicht angewendet werden, wenn bei der Lagerung individuell empfundene Schmerzen auftreten.

7. Durchführung der Patientenlagerung

Die Anwendung erfolgt ausschließlich durch geschultes Fachpersonal. Die Auswahl der geeigneten Lagerungshilfe richtet sich nach den individuellen Anforderungen des Patienten und wird vom Fachpersonal entschieden.

8. Lagerung und Handhabung



Das Produkt ist bei Raumtemperatur trocken und lichtgeschützt zu lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit können die Materialeigenschaften beeinträchtigen und sind zu vermeiden.

9. Anwendungshinweise

- Es handelt sich um ein Einmalprodukt, eine Wiederverwendung ist auch nach jedweder Art von Reinigung nicht validiert und daher nicht vorgesehen.
- Die Lagerungshilfen sind nur für den direkten Kontakt mit intakter Haut vorgesehen. Bei Hautverletzungen ist eine fachgerechte Wundabdeckung erforderlich.
- Der Patient ist während der gesamten Lagerungsdauer zu überwachen, um potenzielle Falschlagerungen zu verhindern (siehe Warnhinweise).
- Die Lagerungshilfen sollten ihre ursprüngliche Form beibehalten. Verformte oder defekte Produkte sind auszutauschen.
- Es handelt sich um ein Einmalprodukt, welches nach Verwendung gemäß örtlicher Bestimmung entsorgt werden muss.

10. Warnhinweise

- Die Lagerungshilfen dürfen nicht in Flüssigkeiten getaucht, sterilisiert oder mit aggressiven Reinigungsmitteln behandelt werden.
- Produkt nur bei Raumtemperatur anwenden.
- Die Lagerungshilfen sind nicht mit dem Patienten verbunden. Körperteile des Patienten werden lediglich darauf gelagert, ohne zusätzliche Befestigung.

12. Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Anwendung oder Lagerung. Die Verwendung erfolgt unter der Verantwortung des Fachpersonals.