

Pflegeempfehlung

Material: Polyprotect® - Oberflächen



Vorteile:

- > haut- und patientenfreundliche Beschichtung
- > sehr strapazierfähig
- > herausragende Desinfektions- und Reinigungseigenschaft

Pflege:

- > feucht abwischbar; Flächendesinfektion
- > Reinigung mit haushaltsüblichem Spülmittel

**Desinfektion und
Reinigung:**

**Desinfektions- und Reinigungsmitteltest
ohne erkennbare Oberflächenveränderung
durchgeführt mit**

Incidin Perfect (3 Vol%), Microbac forte (2,5 Vol%)
Biguacid S (2 Vol%), Dismozon pur (4 Gew%)
Spray Activ (unverdünnt), Clorina (1 Gew%)
Ethanol (unverdünnt), Wundbenzin (unverdünnt)
Grün und Mild (haushaltsübliches Spülmittel, 10 Vol%)

**Wischtest ohne erkennbare Oberflächenveränderung
durchgeführt mit**

Wasser, Ethanol

ACHTUNG:

Langfristiger Kontakt mit folgenden Substanzen sollte
vermieden werden:

Säuren wie z. B. Ameisensäure, Essigsäure,
Phosphorsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure
ASTM-Treibstoff I, Ethylalkohol, Trichlorethan
Oxidierende Mittel wie z. B. Kaliumpermanganat oder
Nitrobenzol können die Oberfläche angreifen.
Organische Lösungsmittel können in unterschiedlichem
Maße quellend wirken.

Bitte vermeiden Sie Staunässe, um die Lebensdauer
ihres POLYFORM-Produktes zu verlängern.