




## PFLEGEEMPFEHLUNGEN

Produkt:  
Polyprotect®  
06.07.2021

### Material:

Polyprotect® - Oberflächen

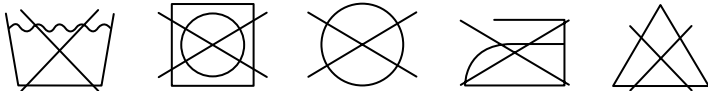

### Vorteile:

- > haut- und patientenfreundliche Beschichtung
- > sehr strapazierfähig
- > herausragende Desinfektions- und Reinigungseigenschaft

### Pflege:

- > feucht abwischbar; Flächendesinfektion
- > Reinigung mit handelsüblichem Spülmittel

### Desinfektion:

#### Desinfektions- und Reinigungsmitteltest ohne erkennbare Oberflächenveränderung durchgeführt mit

Incidin Perfect (3 Vol%), Microbac forte (2,5 Vol%), Biguacid S (2 Vol%), Dismozon pur (4 Gew%), Spray Activ (unverdünnt), Clorina (1 Gew%), Ethanol (unverdünnt), Wundbenzin (unverdünnt) Grün und Mild (haushaltsübliches Spülmittel, 10 Vol%)

**Wischtest ohne erkennbare Oberflächenveränderung durchgeführt mit** Wasser, Ethanol und Isopropylalkohol (unverdünnt)

### ACHTUNG:

Langfristiger Kontakt mit folgenden Substanzen sollte vermieden werden:

Säuren wie z. B. Ameisensäure, Essigsäure, Phosphorsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure  
ASTM-Treibstoff I, Ethylalkohol, Trichlorethan  
Oxidierende Mittel wie z. B. Kaliumpermanganat oder Nitrobenzol können die Oberfläche angreifen.  
Organische Lösungsmittel können in unterschiedlichem Maße quellend wirken.  
Bitte vermeiden Sie Staunässe, um die Lebensdauer ihres POLYFORM-Produktes zu verlängern.